

Polvo Protector Colostomia Rystora

Descripcion

El polvo protector para estomas es un producto a base de hidrocoloide que absorbe la humedad alrededor del estoma, crea una barrera protectora contra irritaciones, y mejora la adhesión de la bolsa de ostomía, ideal para pieles húmedas o dañadas, facilitando la curación y prolongando la vida útil del adhesivo. Se aplica una capa fina sobre la piel limpia y ligeramente húmeda, se retira el exceso, y se forma una "costra" que permite que el adhesivo se adhiera mejor, usando técnicas como la "crusting".

Funciones principales

- Absorbe humedad: Elimina el exceso de líquido de la piel periestomal.
- Crea barrera: Protege la piel sensible de la irritación causada por efluentes y adhesivos.
- Mejora adhesión: Forma una superficie seca y uniforme, permitiendo que la barrera de la bolsa se selle mejor.
- Promueve curación: Ayuda a regenerar tejido dañado y es útil para la técnica de "crusting" en pieles muy irritadas.

Cómo usarlo (Técnica de Crusting)

- Limpiar: Lava y seca suavemente la piel alrededor del estoma.
- Aplicar: Deja la piel ligeramente húmeda y aplica una pequeña cantidad de polvo en las zonas rojas o llorosas.
- Cepillar/Retirar exceso: Usa un pañuelo suave para cepillar o retirar el exceso de polvo, dejando una capa fina.
- Formar costra: Frota suavemente el polvo con una toallita o spray protector para que se vuelva pegajoso y forme una capa protectora.
- Secar y aplicar: Deja secar completamente antes de aplicar la barrera o bolsa de ostomía.
- Discontinuar: Deja de usarlo cuando la piel esté completamente sana y sin irritación.