

Spray de Silicona Rystora 30 ml

Descripcion

USOS

La silicona en Spray protege la piel creando de forma rápida, una película transparente, transpirable, impermeable, de secado rápido y protector anti adherente.

Ayuda a los cortes menores de la piel, abrasiones, ampollas y heridas suturadas.

Crea una barrera transpirable e impermeable.

Evitar la irritación de la piel causada por la fricción y evitar el contacto con el agua, orina, heces, manteniendo la piel seca y cómoda.

Crea una barrera protectora contra la invasión química, física y microbiana de la cicatriz mientras contribuye a la hidratación de la piel.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Spray protector de piel Rystora REF.NO: SY01030

La composicion de los componentes son: 30 ml de silicona volátil, aceite líquido

(hexametildisiloxano y

Polytrimetilhidrosililsiloxano).

Comportamiento bio compatible, inodoro e insípido, de secado rápido en 5 segundos, después del rociado, sin alcohol y sin picar, resistente al agua y transpirable, sin pegajosidad después del secado y no se adhiere a la ropa, etc.

Antes de usar, sacar la tapa y presionar el dispensador para generar la salida del líquido protector del aerosol, entonces la neblina es rociado sobre la piel a través de la boquilla.

CONTRAINDICACIONES

1. No use el spray protector de la piel Rystora en áreas infectadas o áreas de piel sin curar.
2. El producto puede usarse en adultos, niños y bebés, mayores de dos años de edad.

PRECAUCIONES Y OBSERVACIONES

1. El spray protector de la piel Rystora contiene sustancias extremadamente inflamables. hexametildisiloxano. No lo use cerca de fuentes de ignición o dispositivos productores de calor y fuentes de descarga estática.
2. Solo para uso externo, use en un área bien ventilada, evite inhalación y contacto con los ojos.
3. Proteger de la luz solar y no exponer a altas temperaturas
4. No está destinado a ser utilizado en combinación con otros medicamentos preparados.
5. Si se aplica spray protector de piel Rystora en áreas con pliegues o articulaciones de la piel, abra los pliegues de la piel, luego rocíe esta área.

6. Deje de usar cuando su piel sienta una erupción o irritación y consultar a un médico.
7. Mantener fuera del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite bien antes de usar. Limpie y seque completamente la piel.
2. Saque la tapa, antes de usar.
3. Sostenga la boquilla de pulverización aproximadamente de 10 cm a 15 cm (4 a 6 pulgadas) de la piel, y siga presionando la bomba dispensador, luego se rocía, en forma de niebla y aplique una capa uniforme en un movimiento de barrido sobre la piel.
4. La primera capa necesita esperar (aproximadamente 5 segundos) antes de aplicar otra capa. Repita la aplicación en tres capas, por cada vez que use este producto.
5. Según el tipo de lesión, se recomienda repetir la aplicación cada 4 horas.
6. Vuelva a colocar la tapa sobre la boquilla de pulverización, cuando no esté en uso.

DESECHO DEL DISPOSITIVO

1. Deseche la botella vacía de HDPE solo de acuerdo con las regulaciones de tu país.
 2. El ingrediente principal hexametildisilazano es volátil y los aceites de silicona son peligrosos para el medio ambiente acuático.
- Use los aerosoles antes de desechar la botella vacía.

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse solo en un ambiente fresco y seco.

ESTERILIZACIÓN

1. El producto no es estéril.
2. Consulte la etiqueta para ver el tiempo de vencimiento.