

Pads Electrodo para Tens-Ems Rainbow Broche (pares)

Descripcion

USO

Conecte los electrodos autoadhesivos a los cables de equipo.

Quitar la película protectora en la hoja adhesiva antes de usar.

Presione los electrodos autoadhesivos adheridos al sitio a tratar o los puntos correspondientes.

Después del tratamiento, separe el cable del electrodo.

Cuando no haya adherencia, lave la superficie con agua limpia, luego de eliminar la suciedad, se restaurará parte de la fuerza de adhesión.

Los electrodos auto adhesivos son partes consumibles.

Almacenamiento:

Mantener en lugar fresco. Por favor, tenga cuidado de usar, la temperatura de almacenamiento es de 10 y 40 grados C., evitar la luz solar directa.

La hoja de electrodos puede usarse entre 50 y 100 veces, después de limpiar la piel, puede extender la vida útil de la hoja del electrodo.

Limpie la superficie de la piel para eliminar los aceites de la piel y el sudor, puede hacer mejores tratamientos y puede prolongar la vida útil de los electrodos.

¿Muchas horas frente al computador? ¿Sus articulaciones le duelen cuando va a llover?

¿Alguna vez ha experimentado dolores musculares?

¿Tiene que pagar altos costos de tratamiento kinésico?.

Tiene dolor de hombros, cintura, espalda, etc. por estar delante del computador muchas horas?

¿Sus articulaciones le duelen cuando va a llover?

¿Alguna vez ha experimentado dolores musculares?

¿Tiene que pagar altos costos de tratamiento kinésico?.